

TM-Alert_ Bruksanvisning_v 1_SE

2022-05-31



Tack för att ni köpt TM-Alert bärbara Bluetooth® Alert. Vänligen läs denna användarmanual väldigt noggrant före bruk och behåll den för framtida hänvisning. Om ni skulle ha några frågor, vänligen kontakta:

Email address: alert@tmeeting.se

Viktiga säkerhets instruktioner:

När ni använder **TM-ALERT** bärbara Bluetooth® Alert bör grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas i samtliga fall för att reducera risker för brand, elektrisk shock eller skada till person, inklusive följande:

1. Vänligen läs samtliga instruktioner före användandet av denna produkt.
2. Denna produkt använder sig utav uppladdningsbara lithium batterier, som inte är utbytbara av användaren.
3. Upphör att använda denna produkt om ni märker av något oroande tecken.
4. Använd endast tillbehör/tillägg som är specificerade av tillverkaren.
5. Undvik att lagra produkten vid temperaturer utanför de normala intervallen (under -10°C eller över +60°C), eftersom höga temperaturer riskerar att korta ned livstiden av elektroniska enheter, orsaka deformation av plast höljet, skada batteriet, eller till och med laddas upp till en explosion. Lagring av enheten vid låga temperatur kan orsaka att fukt skapas på insidan av enheten då den återvänder till sin normala operativa temperatur.
6. Denna enheten är endast stänk säker. Sänk inte ned denna enhet i vatten.
7. Koppla inte från enheten genom att dra i ström sladden.
8. Handskas inte med enheten om den slutar att fungera, blir tappad eller skadad i någon form. Returnera enheten till närmaste auktoriserade anläggning för undersökning eller reparation.
9. Företaget har den slutgiltiga tolkningen av instruktionerna.
10. Företaget reserverar rättigheten till att göra ändringar av innehållet i denna manual utan förvarning.
11. Specifikationen av denna produkten kan komma att ändras utan förvarning. Vissa av funktionerna kan skiljas åt mellan olika mjukvaru versioner.

Avyttrande av **TM-ALERT**s använda komponenter:

Vänligen avyttra **TM-ALERT**s batterier ordentligt, enligt gällande lokala förordningar. Släng **INTE** produkten/använda batterier i hushålls soporna. Ta produkten till närmaste återvinnings central. Nationella och lokala avyttrings förordningar måste respekteras!



Denna produkt har skapats med material och element utav hög kvalitet, som är lämpliga för återvinning.




Denna symbol på produkten innebär att produkten omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2006/66/EC.



Denna symbol på produkten innebär att produkten omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19 / EU.

Paketets innehåll:

Din **TM-ALERT** bärbara Bluetooth® Alert är paketerad med varorna listade nedan. Om någon saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart.

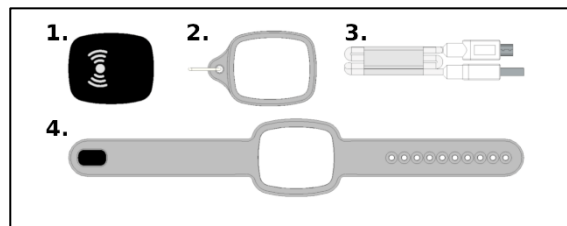


1. **TM-ALERT** enhet
2. Halsbandshölje med metall ring
3. USB kabel
4. Handledsband

Funktions identifiering:



Ladda **TM-ALERT**:

Koppla ena sidan av ladd kabeln till en standard USB AC- adapter (medföljer ej), och koppla micro USB änden till en ladd port i **TM-ALERT**. En full laddning tar 2 timmar och möjliggör användning i 1 månad.

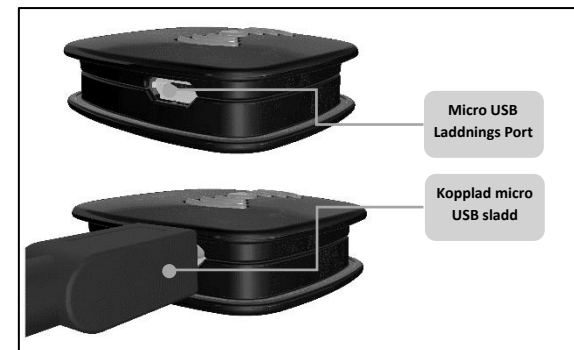

Ladda ned APP:

1. Gå till App Store eller Google Play™ Store och sök efter "TM-Alert" appen av T-Meeting.
2. Ladda ned och installera gratis appen på din IOS eller Android enhet.

Anslut **TM-ALERT** till din Smart phone

1. Starta **TM-Alert** applikationen.
2. Anslut **TM-ALERT** enheten till en laddare.
3. Aktivera Bluetooth anslutning och lokalisering på din smartphone.
4. Sätt igång **TM-Alert** applikationen.
5. Välj "Enheter" alternativet från huvud meny och välj sedan "lägg till ny enhet" på din Android, eller Dra för att Uppdatera på din iOS enhet. Appen borde börja söka efter enheter i närheten.
6. Välj din enhet och bekräfta ditt val genom att trycka på "ja" på din iOS enhet.
7. Tryck OK. Du är nu ansluten.

Döp om din **TM-ALERT**

1. Starta **TM-Alert** applikationen.
2. Välj "Enheter" alternativet från huvudmenyn och välj sedan din enhet.
3. Tryck "Döp om".
4. Tryck OK.
5. Nu har din enhet ett nytt namn.

Uppdatera firmware på **TM-ALERT**

1. Starta **TM-Alert** applikationen.
2. Anslut **TM-ALERT** enheten till en laddare med micro USB sladden.
3. Välj "Enheter" alternativet från huvudmenyn och välj sedan din enhet.
4. Tryck "Firmware Uppdatering" och bekräfta ditt val genom att trycka på "OK" knappen på din Android eller "Ja" på din iOS enhet.
5. Uppdaterings processen påbörjas omedelbart.

Välj notifieringar för **TM-ALERT**

1. Starta **TM-ALERT** applikationen.
2. Välj "Notifierings" alternativet från huvudmenyn och bocka sedan för alternativet framför knappen för den typen av notifieringar du är intresserad utav.
3. Bekräfta det förbuckade alternativet så att den fylls i med blå färg. Nu kommer **TM-ALERT** enheten att notifiera dig med ljus och vibrerande signaler för den valda notifieringen. Du kan hitta "Ring", "TM Samtal", "SMS", "E-Mail", "Alarm" och "Applikations" notifieringar.
4. För att ändra vibrationer och blinkande signaler för den valda notifieringen i **TM-ALERT** enheten, så behöver du välja rätt notifikation för motsvarande knapp, och sedan lägga till "Ny notifiering" och sedan ange samtliga detaljer. "Standard notifiering" fabriks återställer inställningarna för den givna notifierings typen.
5. Du kan redigera existerande notifikations inställningar genom att trycka på redigerings ikonen. Kom ihåg att spara efter varje ändring.
6. "Applikations" knappen är en samlingsknapp och förflyttar dig till en under meny som listar vanliga applikationer (som Facebook, Twitter, Instagram, etc) som stöds utav **TM-ALERT** enheten, med möjligheten till att ändra vibrerande och blinkande signal inställningar för varje applikation som stöds och är listad separat. Väljer man "Ny notifiering" eller återställer standard inställningar så fungerar detta precis som de andra notifieringarna som nämndes tidigare (som "Ring", "SMS", etc).

Rengöring och underhåll:

1. Rengör handleds bandet och halsbands höljets yta med en mjuk, torr duk.
2. Använd INTE någon typ av spray på handleds bandet. Använd INTE någon typ av lösning, kemikalie eller rengörings lösning som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
3. Låt INTE någon typ av vätska hällas på öppningarna till **TM-ALERT** enheten.

Specifikation:

- Bluetooth Version: 4.0 eller senare
- Synkning: iOS 10 och högre / Android 5.0 och senare
- Lysande lampa: RGB LED
- Överförings ström: Klass 2
- Parade enheter: Upp till 1 Smartphone parat till en **TM-ALERT** enhet
Upp till 1 **TM-ALERT** enhet parat till en Smartphone
- Effektivt Avstånd: Ungefär 10m (33feet)
- Batterier Installerade: 3.7V 130mAh Li-Po återladdningsbara
- Användningstid: Ungefär 1 månad
- Standby tid: Ungefär 3 månader
- Batteri Ladd tid: Ungefär 2-3 timmar
- Laddnings sladd: Micro USB
- Laddnings Volt: 5VDC 50mA
- Strömförsörjning: Ingår inte
- Operativ temperatur: -10°C till 60°C
- Laddnings temperatur: 0°C till 40°C
- Dimensioner: Ungefär 13.4x36x43.5mm plus bandens dimensioner
- Enhets vikt: Ungefär 14g (0.5 oz.)
- Vikt med handleds band: Ungefär 31g (1.1 oz.)
- Vikt med halsbands höljat: Ungefär 18g (0.6 oz.)

Specifikationerna kan förändras utan förvarning.

Garanti / Service Information:

Din **TM-ALERT** Bärbara Bluetooth® Alert kommer med två års begränsad garanti och räknas från datumet av det ursprungliga detaljhandels köpet. Vid normal användning så kommer **TM-ALERT** att vara fri från defekter i material och utförande. I händelse av att **TM-ALERT** ej fungerar ordentligt under garanti perioden, returnera enheten med förbetald frakt, tillsammans med ett inköps bevis (kvitto eller packning sedel, inga undantag) till T-Meeting Global AB.

T-Meeting global AB kommer antingen att reparera eller ersätta enheten (med en ny, renoverad eller en enhet med samma skick som den ni skickade) och returnera denna till er utan extra kostnad (det tillkommer nominella tilläggs kostnader för frakten vid försändelser utanför EU).

Denna garantin gäller inte för någon produkt som av misstag har skadats på grund av missbruk, fel användning, oaksamhet, användning vid annan elektrisk frekvens eller voltage än det som angivits på produkten och/eller är beskrivet i denna manual. Defekter eller felaktigheter som orsakats av otilåtna modifieringar, reparationer och/eller manipulering är även dessa inte täckta av denna garantin. Vänligen säkerställ att batterierna avyttras på ett korrekt sätt, enligt lokala föreskrifter. Bränn inte batterierna.

Oavsiktliga eller följdskador

Denna garantin ger dig specifika lagliga rättigheter och ni har även varierande lagliga rättigheter beroende på vilket land ni befinner er i.

Om en defekt produkt upptäcks under gällande garanti period, så bör ni omedelbart kontakta oss med hjälp av vårt kundtjänst nummer eller via e-mail. Under samtalets gång kommer ni att motta ett "Return Merchandise Authorization" nummer (RMA) samt instruktioner för att frakta produkten. Ni kan även logga in på www.tmeeting.com för att motta ett RMA samt instruktioner för frakten före ni sänder produkten till **T-Meeting global AB**. En produkt utan RMA nummer kommer inte att accepteras och kommer att återsändas er på er bekostnad. En auktoriserad produkt måste medföljas av ett köpebevis samt en kort förklaring på ert problem.

För reparationer och service utav en produkt vars garanti har gått ut, vänligen kontakta vårt kundtjänst för ett prisförslag samt instruktioner. Även här kan ni använda er utav vårt kundtjänst telefon nummer eller e-mail adressen som är angiven i denna manual.

FCC Reglementet och information

Denna enheten uppfyller kraven angivna i del 15 av FCC reglementet. Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enheten får inte åsamka skadlig störning och (2) denna enheten måste acceptera störning mottagen, inkluderande störning som kan orsaka oönskad drift. Denna utrustning har testats och har befunnits följa gränserna av en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC reglementet. Dessa gränser är designade för att kunna ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid en bostads installation.

Denna utrustningen genererar, använder och kan utstråla radio frekvens energi om den inte är installerad och brukad i enlighet med instruktioner, och kan orsaka skadlig störning till radio kommunikation. Däremot finns där ingen garanti för att störning inte kommer att förekomma vid en specifik installation. Om denna utrustningen skulle orsaka skadlig störning till radio eller tv-mottagning, kan detta bedömas genom att stänga av och sätta på utrustning, därefter kan ni prova följande metoder för att korrigera störningen:

1. Där det kan göras säkert, omorientera tvn eller radions mottagande antenn.
2. Till den utsträckningen det är möjligt, öka separationen mellan utrustningen och mottagaren.
3. Anslut AC adapter till utrustningen i ett annat uttag, eller till en annan säkring.
4. Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp. Modifiering: Samtliga modifieringar är inte uttryckligen godkända av tillverkaren av denna enheten, och skulle kunna ogiltigförklara användarens tillåtelse att bruka enheten.

Denna Klass B digitala enhet uppfyller och överensstämmer med kraven ställda i Canadian ICES-003. RSS 201 Utgåva 8.

Kontakt information, Teknisk support, Råd, Kundtjänst

Europa i Malmö AB

Amiralsgatan 20

211 55 Malmö

tmeeting.se

support@tmeeting.se

Våra produkter har EU-försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter 2017/745/EU

Bluetooth® är ett varumärke Bluetooth SIG, Inc.
App Store® är ett varumärke av Apple Inc.
Google Play™ är ett varumärke av Google Inc.

Copyright © 2019 Tmeeting global AB.

Denna produkten har skapats av, och är såld under ansvaret av Europa i Malmö AB, och Europa i Malmö AB är garanten i relation till denna produkten.

TM-ALERT är varumärke av Europa i Malmö AB och används under samma license.

EU-försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter 2017/745/EU

Produktmodell: TM-Alert

Tillverkare:
Europea i Malmö AB
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö

Försäkrar på eget ansvar att:
TM-Alert

Uppfyller kraven enligt 2017/745/EU
samt är en medicinteknisk produkt av klass I
i enlighet med regel 11 i bilaga VIII.

UDI 17350124410101 + Serienummer

Undertecknat

Malmö 2021-12-15

Tillverkare

Europea i Malmö AB



Faruk Tairi
VD Europea i Malmö AB

T-MEETING 