

Lathund TM-Touch iPadOS



TM-Touch iPadOS-_Lathund_version 1_SE


2022-12-12


Starta programmet:




- Starta TM-Touch genom att trycka på ikonen på iPaden.


Ringa ett samtal

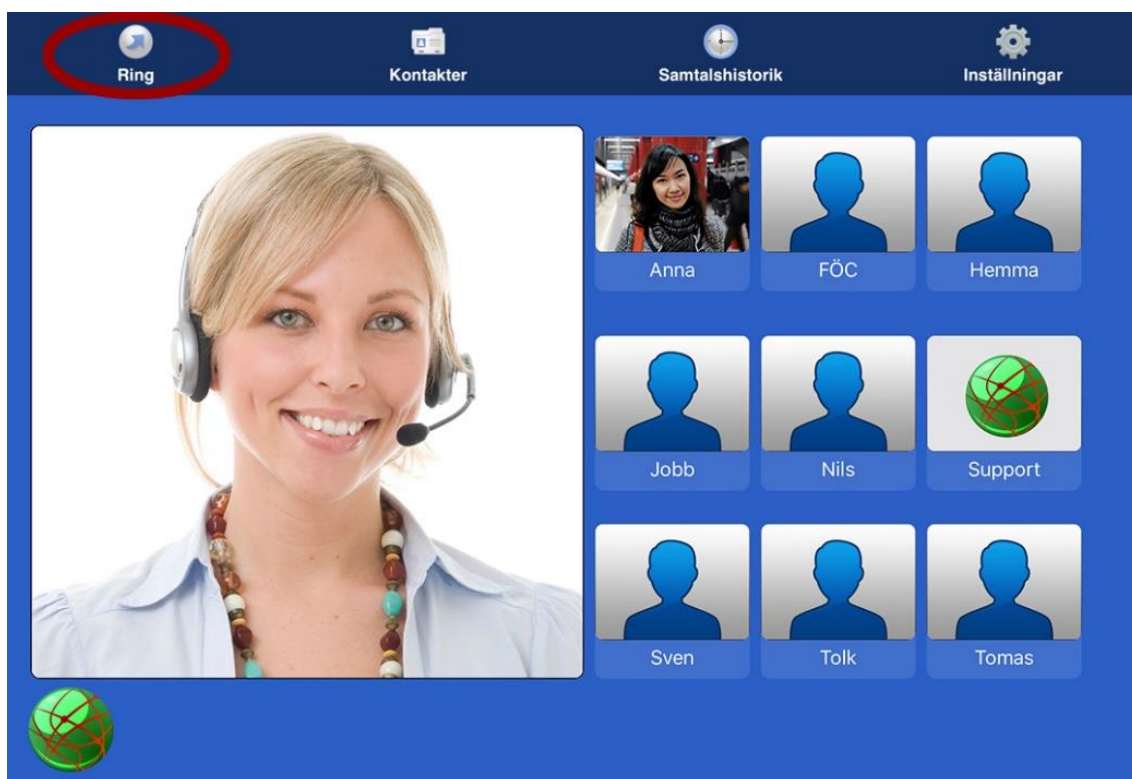


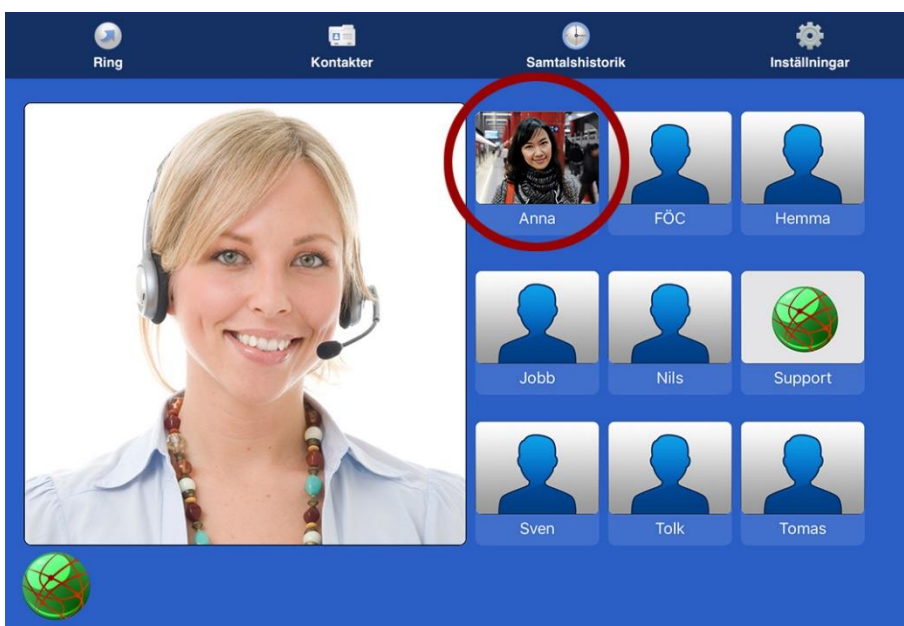
- Ring genom att trycka på symbolen  [Ring].

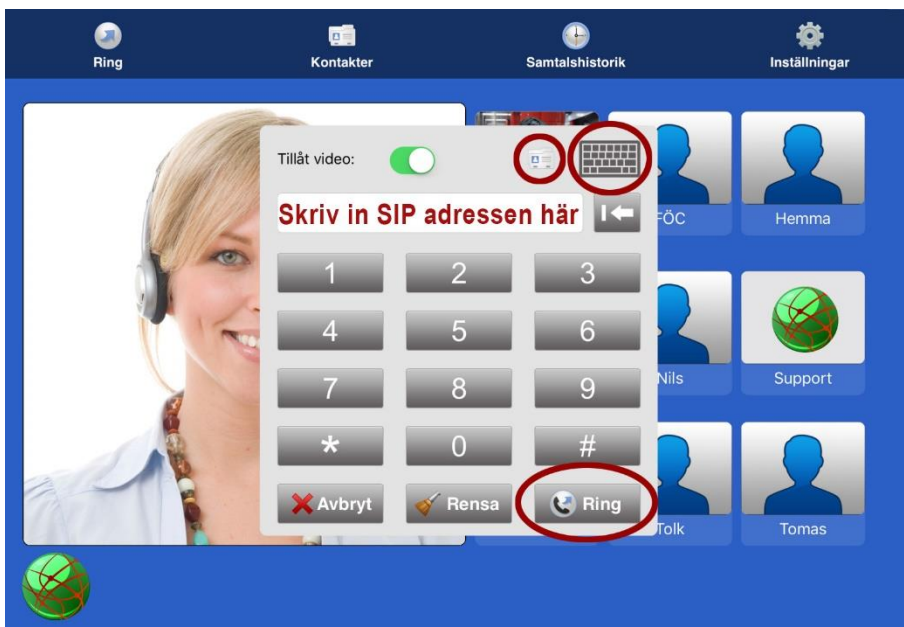

- Skriv in SIP adressen till den du vill ringa till och tryck på .


- För att skriva in SIP adress med bokstäver tryck på  för att få fram tangentbordet.

- Ring från dina kontakter genom att trycka på symbolen  du får upp en lista med dina kontakter.





- Du kan också ringa genom att trycka direkt på ett kortnummer som du har skapat.

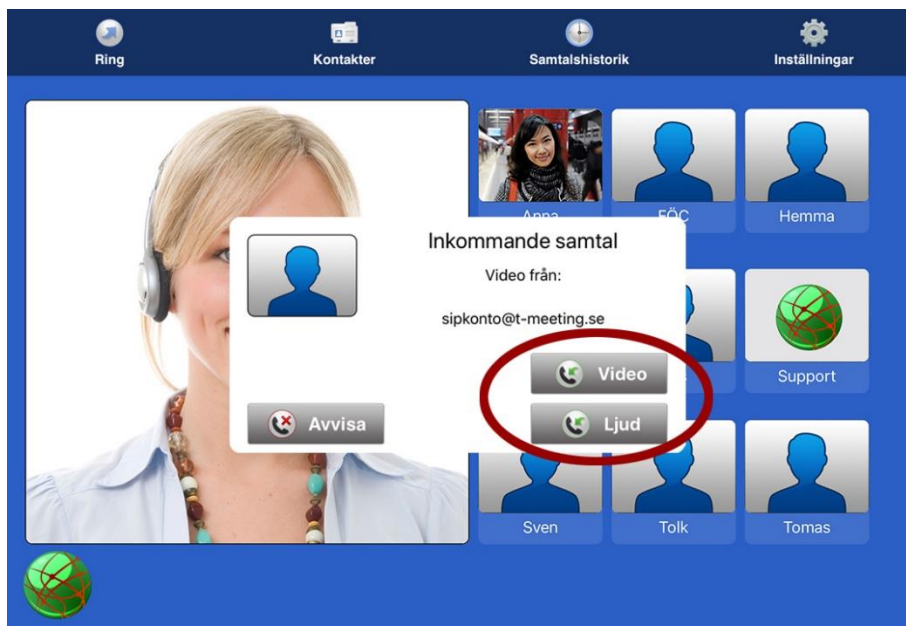Svara på ett samtal




Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på


-  **Video** för bildtelefonsamtal.
-  **Ljud** för samtal utan bild (enbart ljud + text).

Avsluta ett samtal




Avsluta genom att trycka på  [Lägg på]. Ser du inte knapparna under samtalet tryck lätt en gång mitt på skärmen.


Lägga till kontakter

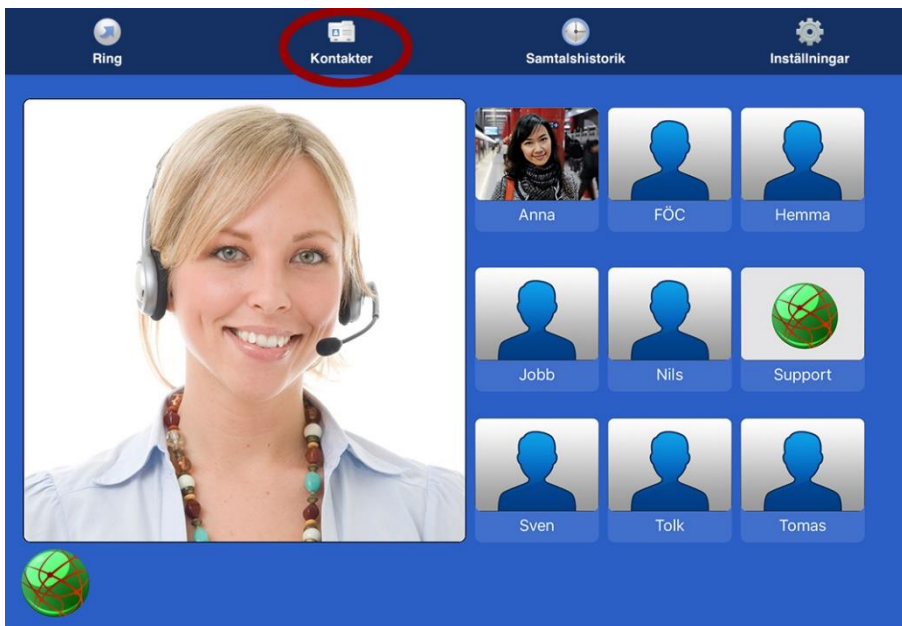


- Tryck på symbolen  [Kontakter] för att hantera dina kontakter

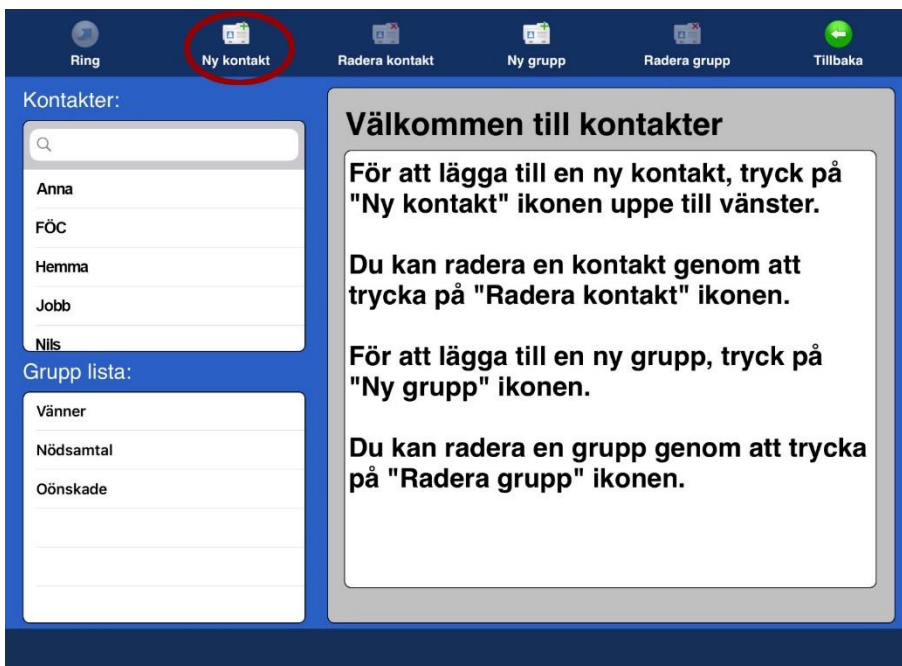


- Tryck på  [Ny kontakt] för att lägga till en ny kontakt.


- Fyll i namn, välj grupp, skriv in SIP adressen och välj kortnummer om du vill ha det.
- När alla ovanstående fält är ifyllda, tryck på .

Text och video meddelanden

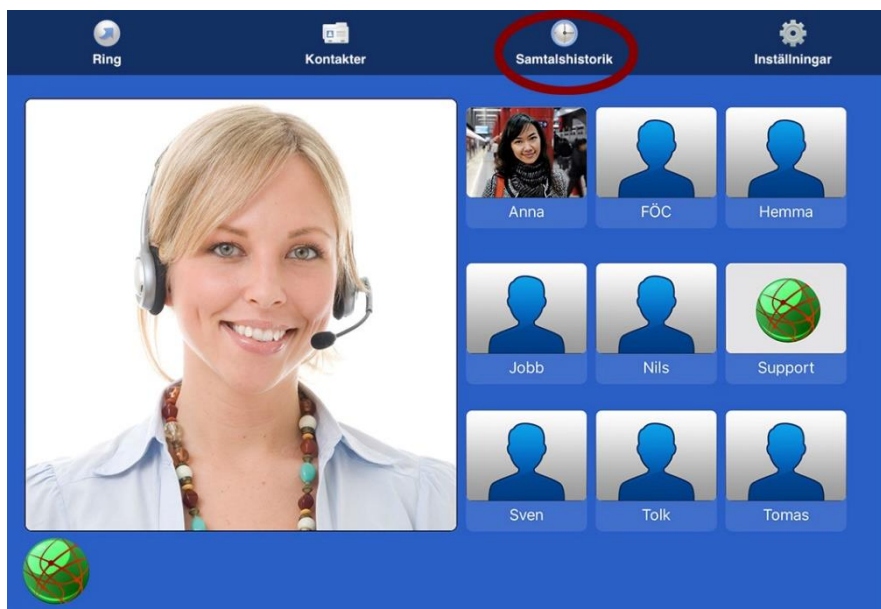




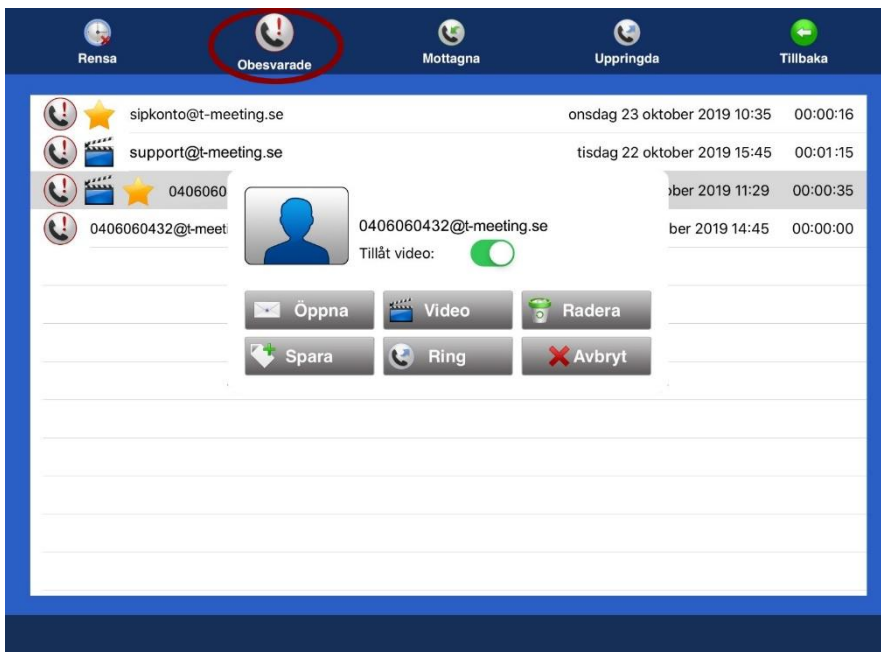
- Tryck på  [Samtalshistorik] på startsidan. Om du har missade samtal står det med röda

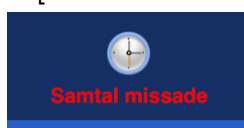

bokstäver






- Tryck på  [Obsvarade] för att få en lista över vilka samtal du har missat och vilken tid de kom in. En stjärna  framför betyder att ett textmeddelande har lämnats. En filmikon  framför betyder att ett videomeddelande har lämnats. Tryck på det meddelande du vill läsa eller se.



- Tryck på  **Öppna** för att se lämnat textmeddelande eller läsa sparad chatt under samtal.
- Tryck på  **Video** för att se lämnat videomeddelande.




MDR 2017/745/EU
Klass I

TM-Touch iPadOS
BASIC UDI 735012441TMTouchiPad8U


TM-Mobils IOS
BASIC UDI 735012441TMMobilsIOSUK

TERA-Mobile iOS
BASIC UDI 735012441TERAMobileIOSMU

TERA-Touch iPadOS
BASIC UDI 735012441TERATouchiPad57



Europea i Malmö AB
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö





tmeeting.se

support@tmeeting.se